

エナメル質歯間隣接面ストリッピング用

コンタックEZ

イーズ

IPR用ストリップ
(Interproximal Reduction)

片手でラクラク！操作可能！



マウスピース矯正などで、歯を並べるスペースがない場合に、
歯間部に歯を動かすための隙間を作るため、
エナメル質歯間隣接面を研削するためのストリップです。

1パック 8個入

- コンタックEZ IPR用ストリップ アソート8個入
内容：イエロー、レッド、ダークブルー、グリーン 4種類×各2個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ イエロー 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ レッド 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ ダークブルー 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ グリーン 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド) アソート8個入
内容：クリア、シアン、パープル、ブラウン 4種類×各2個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド) クリア 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド) シアン 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド) パープル 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド) ブラウン 8個入

1箱 32個入(8個入×4パック入)

- コンタックEZ IPR用ストリップ アソート32個入
内容：イエロー、レッド、ダークブルー、グリーン (4種類×各2個入)×4パック入
- コンタックEZ IPR用ストリップ イエロー 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ レッド 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ ダークブルー 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ グリーン 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド) アソート32個入
内容：クリア、シアン、パープル、ブラウン (4種類×各2個入)×4パック入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド) クリア 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド) シアン 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド) パープル 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド) ブラウン 32個入

コンタックEZ IPR用ストリップ

イーズ



コンタックEZ IPR (Interproximal Reduction) 用ストリップは、エナメル質歯間隣接面ストリッピング用の研削用ストリップです。

- ▶ 片手で操作ができ、適切なコントロールが可能で、手の疲労感を減少させます。
- ▶ 柔軟なストリップのため、自然な歯の外形に形態修正を行うことができます。
- ▶ オートクレーブ滅菌(132℃、10分間)および再使用(目安:3~5回)が可能です。

IPR用ストリップ

種類	イエロー	レッド	ダークブルー	グリーン
外観				
ブレード厚さ	0.07mm	0.12mm	0.15mm	0.20mm
ダイヤモンド粒子	片面 22 μm	両面 32 μm	両面 45 μm	両面 45 μm
鋸歯	上下鋸歯付	鋸歯なし	鋸歯なし	鋸歯なし

IPR用ストリップ(ワイド)

種類	クリア	シアン	パープル	ブラウン
外観				
ブレード厚さ	0.10mm	0.15mm	0.25mm	0.30mm
ダイヤモンド粒子	片面 32 μm	片面 45 μm	両面 45 μm	両面 45 μm
鋸歯	上下鋸歯付	鋸歯なし	鋸歯なし	鋸歯なし

ご使用方法



予めオートクレーブ滅菌した本品を用途に応じて選択します。
エナメル質歯間隣接面の切削量に応じて、薄い厚さのストリップから順(イエロー、クリア、レッド、シアン、ダークブルー、グリーン、パープル、ブラウン)に使用してください。
本品の把持部を保持して、ストリップの研削面をエナメル質の切削面に向けて歯間部に挿入し、エナメル質歯間隣接面を研削します。
※垂直方向に動かさないで下さい。



コンタックEZゲージを用いて、エナメル質の切削量の必要な厚みを確認してください。

コンタックEZゲージ



●歯間隣接面間を測定するためのゲージです。

1セット6種類入
0.10mm、0.20mm、0.25mm、
0.30mm、0.40mm、0.50mm