

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材(31750002)

ウルトラバンドLOK

【禁忌・禁止】

- 本品又はメタクリル酸系のモノマーに対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、プッシュシリンジがあり、シェードは、ブルーがある。

- 本品の形状・性状、成分は以下に記載のとおり。

シェード	形状	成分
ブルー	ペースト	バリウムガラス、ストロンチウムガラス、二酸化ケイ素、フッ化ナトリウム、 Bis-GMA、トリエチレングリコールジメタクリレート、カンファーキノン、色素、他

- 原理

光重合により硬化する。

【使用目的又は効果】

歯列矯正用帯環を歯又は歯科修復物に合着又は接着に用いる。

【使用方法等】

- 歯面をフッ素無配合の歯面研磨材で清掃し、水洗、乾燥、防湿をする。
- バンドを試適し、バンドの内面を清掃する。
- 本品のキャップを取り外し、シリンジ先端からペーストを押し出す。
バンドの内面に(均一に薄く)塗布する。
- バンドを装着し、余剰ペーストを除去する。
- 咬合面側から、バンドの頂上付近をゆっくりと円を描くように動かしながら、30秒間(500mW/cm²)光重合する。

【使用法に関連する使用上の注意】

- 歯面清掃時は、歯肉を損傷しないように注意すること。僅かな出血であっても汚染の原因となり、接着強度を低下させることがある。
- 本品の使用前は、エナメル質のエッチング処理は不要であるが、バンドの接着に高い接着強度が必要な場合は、本品の使用前にエナメル質のエッチング処理を推奨する。
- バンドの内面処理については、バンドの製造業者の指示に従うこと。
- 本品は、使用前に室温に戻すこと。
- ミキシングパッド上に、本材を所要量採り、直ちに、キャップを閉める。

【使用上の注意】

【使用注意】

- 他の製品と混合して使用しないこと。
- 誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合には、うがいをさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- 使用後の容器等は、「廃棄物に関する法律」等に従い、適切に処理すること。
- 本品は窓際又はライト直下等、明るい場所で硬化することがあるため、強い光の当たらない場所で使用すること。
- 接着の際には、温度や併用する材料により、ペーストの硬化が早くなるので、ペースト塗布後は速やかにバンドの装着を行うこと。
- ポーセレンクラウン等への接着後、ディボンディングの際、被着体が剥離したり破損等することがあるので、注意し、損傷のある、あるいは薄い表面加工のポーセレンクラウン等への使用は避けること。
- バンドに溶着されたアタッチメントに接着材が迷入しないよう、あらかじめブロックアウトしておくこと。
- 光照射器を使用する際には、保護メガネ等を使用すること。

【重要な基本的注意】

- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 本品の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。
- 本品を皮膚に付着させたりしないように注意すること。皮膚に付着した場合は、すぐに石鹸と流水で十分に洗浄すること。その他軟組織に付着した場合は、速やかに大量の水で数分間洗い流すこと。
- 万一、目に入った場合はすぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

直射日光、高温多湿を避け、2～8℃の暗所にて冷蔵保管すること。

【使用期限等】

構成品の包装に記載の使用期限までに使用すること。

記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Reliance Orthodontic Products, Inc. (リライアンス オーソドンティック プロダクツ社)
製造国	アメリカ合衆国(USA)