


機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（70682000）
オルソリー ミキシングチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：

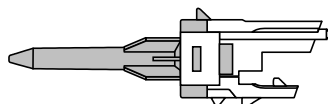

先端内径	全長
1mm	64mm

40本入り

材質：

名称	材質
ハウジング	ポリプロピレン
ミキシングエレメント	ポリオキシメチレン
エアカップ	ポリプロピレン
ホルダー	ポリプロピレン
クリップ	ポリオキシメチレン

原理：カートリッジから押し出された材料がミキシングチップ内のミキシングエレメントにより攪拌練和される。

【使用目的又は効果】


歯科用合着材の練和に使用する。

【使用方法等】

準備

CDディスペンサーにカートリッジを装着します。キャップ取り外し後、両シリンジからペーストを少量押し出してすり切り、両シリンジのペースト位置を合わせます。


- 1) ミキシングチップのガイドピンとカートリッジの孔を揃え、適正位置まで押し込み正確に装着します。

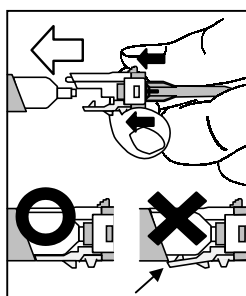

装着後は左下の状態となります。クリップの爪が上がった状態（右下）は押し込みが不完全です。

- 2) CDディスペンサーのレバーを押し込み、材料を押し出します。

- 3) 押し出し後のミキシングチップを前方に押しながら、チップ先端を左右に振ることで取り外し、キャップを装着します。

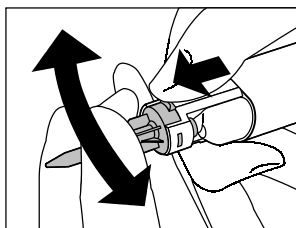

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) カートリッジにミキシングチップが確実に装着されていることを確認してから押し出すこと。
- 2) 材料を急激に押し出すと、ミキシングチップが外れる恐れがあるので、ゆっくりレバーを押し込むこと。
- 3) 無理な力や角度で装着・脱着を行わないこと。
- 4) 本品を用いる場合、接合部に手指を挟まないように注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 使用後のミキシングチップを、カートリッジに装着したまま保管しないこと。
 - ② 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ③ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
- 2) 直射日光を避けて保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシーオルソリー
住所：〒174-8585 東京都板橋区蓮沼町76番1号
電話番号：（お客様窓口）0120-108-171