

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント(41059000)
ジープラケット


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.酸化ジルコニウムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
- 2.本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 3.再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 1.種類
上顎切歯、下顎切歯、犬歯・小臼歯、上顎切歯S、下顎切歯S、犬歯・小臼歯Sがあり、色調はA1である。
- 2.構造
歯列矯正用ワイヤーを通し、結紮できる構造。
- 3.原材料
主成分:酸化ジルコニウム
- 4.原理
酸化ジルコニウムを主成分とする歯列矯正用アタッチメント
- 5.形状

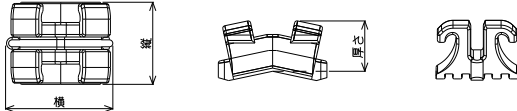

6.寸法 スロット 0.47 ミリ(0.018 インチ) (単位 : mm)

項目	縦	横	高さ
上顎切歯	3.2	4.2	2.1
上顎切歯S	3.2	4.0	1.87
下顎切歯	3.2	3.8	2.1
下顎切歯S	3.2	3.8	1.87
犬歯・小臼歯	3.2	4.2	2.0
犬歯・小臼歯S	3.2	4.1	1.82

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。

【使用方法等】

- 1.要移動歯牙、固定歯牙の唇側に歯科矯正用接着材で接着する。
- 2.スロットに歯列矯正用ワイヤーを挿入し、ウイングにリガチャーワイヤーで結紮、固定し使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1.ボンディングベースが油分などで汚れていると適切な接着力が得られない。
- 2.使用される接着材については軟らかいボンディング材を使用のこと。硬いボンディング材の場合は、ベース溝に確実に入り込んでいることを確認のこと。

【使用上の注意】

【使用注意】

- 1.本品は再使用しないこと。
- 2.過度の力を加えると破損する恐れがあるので注意すること。

【重要な基本的注意】

- 1.酸化ジルコニウムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
- 2.本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

***【保管方法】**

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

【セット包装】

- ・ジープラケット1症例セット(上下顎3-3) 12個
 - ・上顎切歯 4個
 - ・下顎切歯 4個
 - ・犬歯・小臼歯 4個
- ・ジープラケット1症例Sセット(上下顎3-3) 12個
 - ・上顎切歯S 4個
 - ・下顎切歯S 4個
 - ・犬歯・小臼歯S 4個

【単品包装】

- ジープラケット上顎切歯 10個
- ジープラケット上顎切歯S 10個
- ジープラケット下顎切歯 10個
- ジープラケット下顎切歯S 10個
- ジープラケット犬歯・小臼歯 10個
- ジープラケット犬歯・小臼歯S 10個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者 **株式会社モリムラ
- 電話番号 **03-5808-9350
- 製造業者 株式会社パイロットコーポレーション