

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント(41059000)

シャインMジルコニアブラケット


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.酸化ジルコニウムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
- 2.本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には 使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 3.再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 1.種類
**スタンダードタイプ(上顎中切歯、上顎側切歯、下顎切歯、上・下顎犬歯、上・下顎小臼歯)、ロスタイプ(上顎中切歯、上顎側切歯、上顎犬歯、上顎小臼歯、下顎切歯、下顎犬歯、下顎第1小臼歯、下顎第2小臼歯)があり、色は単色(白色)である。
- 2.構造
歯列矯正用ワイヤーを通し、結紮できる構造。
- 3.原材料
主成分:酸化ジルコニウム
- 4.原理
酸化ジルコニウムを主成分とする歯列矯正用アタッチメント
- 5.形状

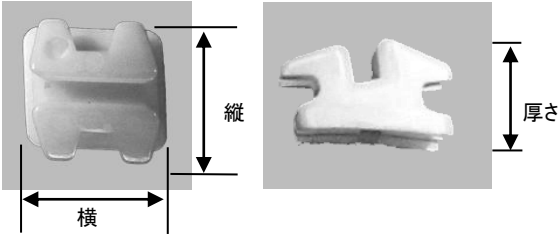

6.寸法

**1)スタンダードタイプ

スロット 0.46mm(0.018 インチ) (単位 : mm)

項目	縦	横	厚さ	トルク	アンギュレーション
上顎中切歯	3.6	3.9	1.93	0°	0°
上顎側切歯	3.6	3.5	2.02		
下顎切歯	3.6	3.0	2.25		
上・下顎犬歯	3.6	3.6	2.1		
上・下顎小臼歯	3.6	3.5	2.17		

**2)ロスタイプ

スロット 0.46mm(0.018 インチ)/0.56mm(0.022 インチ) (単位 : mm)

項目	縦	横	厚さ	トルク	アンギュレーション
上顎中切歯	3.9	4.0	2.3	+12°	+5°
上顎側切歯	3.9	3.5	2.7	+8°	+9°
上顎犬歯	5.2	4.1	2.6	-2°	+10°
上顎小臼歯	3.9	4.0	2.6	-7°	0°
下顎切歯	3.8	3.2	2.6	-1°	0°
下顎犬歯	5.2	4.1	2.6	-11°	+7°
下顎第1小臼歯	3.9	3.8	2.4	-17°	0°
下顎第2小臼歯	3.9	3.8	2.6	-22°	0°

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。

【使用方法等】

- 1.ロスタイプブラケットを使用する場合には、ウイング部カラーコードのドットを目安に方向を確認して下さい。
- 2.カラーコードのドットは消毒用エタノール等で拭き取って下さい。
- 3.要移動歯牙、固定歯牙の唇側に歯科矯正用接着材で接着する。
- 4.スロットに歯列矯正用ワイヤーを挿入し、ウイングにリガチャーワイヤーで結紮、固定し使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1.ボンディングベースが油分などで汚れていると適切な接着力が得られない。

2.使用される接着材について軟らかいボンディング材の使用のこと。硬いボンディング材の場合は、ベース溝に確実に入り込んでいることを確認のこと。

【使用上の注意】

[使用注意]

- 1.本品は再使用しないこと。

[重要な基本的注意]

- 1.酸化ジルコニウムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
- 2.本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

[キット包装]

**シャイン M ジルコニアブラケット スタンダードタイプ/ロスタイプ
(上下顎5-5)1 症例キット 20 個

項目	製品番号	
	スロット幅 0.018 インチ	スロット幅 0.022 インチ
スタンダードタイプ(上下顎5-5)1 症例キット	18-7000	
ロスタイプ(上下顎5-5)1 症例キット	18-5000	22-5000

[単品包装]

**1)シャイン M ジルコニアブラケット スタンダードタイプ 各 10 個

項目	製品番号	
	スロット幅 0.018 インチ	
上顎中切歯	18-7001	
上顎側切歯	18-7002	
下顎切歯	18-7005	
上・下顎犬歯	18-7003	
上・下顎小臼歯	18-7004	

**2)シャイン M ジルコニアブラケット ロスタイプ 各 10 個

項目	右 左	製品番号	
		スロット幅 0.018 インチ	スロット幅 0.022 インチ
上顎中切歯	右	18-5001R	22-5001R
	左	18-5001L	22-5001L
上顎側切歯	右	18-5002R	22-5002R
	左	18-5002L	22-5002L
上顎犬歯	右	18-5003R	22-5003R
	左	18-5003L	22-5003L
上顎小臼歯	右	18-5005R	22-5005R
	左	18-5005L	22-5005L
下顎切歯	右	18-5111	22-5111
	左	18-5111	22-5111
下顎犬歯	右	18-5113R	22-5113R
	左	18-5113L	22-5113L
下顎第1小臼歯	右	18-5114R	22-5114R
	左	18-5114L	22-5114L
下顎第2小臼歯	右	18-5115R	22-5115R
	左	18-5115L	22-5115L

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 *株式会社モリムラ
電話番号 *03-5808-9350
製造業者 ダエソン メディカル シーオー
(DAESEUNG MEDICAL Co.)
製造国 大韓民国