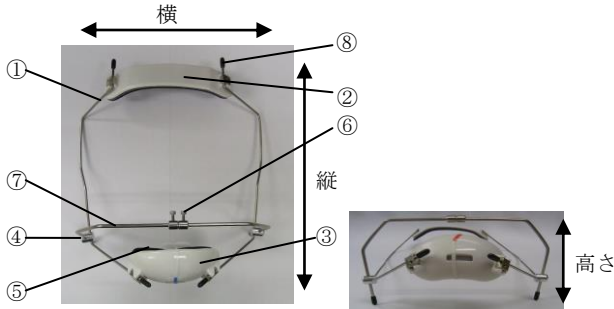


機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯列矯正用ヘッドギア（31757000）
フェイシャルマスク

【禁忌・禁止】

1. 他患者間での再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

種類	寸法			重量
	縦	横	高さ	
スモール	200mm	155mm	76mm	55g
ラージ	215mm	155mm	76mm	60g

構成部品ならびに材質

	構成部品	材質
①	フレーム部	ステンレス鋼
②	ヘッドレスト	ポリカーボネート
③	チンキャップ	ポリカーボネート
④	留めネジ部	真鍮
⑤	パッド部	ナイロン、ポリウレタン
⑥	ボルト	ステンレス鋼
⑦	マウスボウ	ステンレス鋼
⑧	ゴムキャップ	合成ゴム

付属品：六角レンチ

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は歯列矯正用器材と併用して、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加える器具である。

【使用方法等】

- ① 顎と頬の長さに適したサイズを選択します。
- ② 本品のヘッドレストとチンキャップの位置を調整し、顔の長さに合わせます。
- ③ ヘッドレストが眉毛の上に位置するように調整します。
- ④ マウスボウを調整し歯牙と一直線上で、マウスラインのやや上のあたりに位置するように調整します。
- ⑤ マウスボウの平行を見ながらチンキャップを調整してください。

[使用方法に関する使用上の注意]

チンキャップの破損を防ぐため、チンキャップ部分を持った状態でワイヤー調節（曲げ伸ばし）しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 患者間の再使用はしないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ② 本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し医師の診断を受けさせること。

- ③ 正常かつ安全に作動すること等を確認するため、保守点検を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 本品は 塩酸、硝酸等の無機酸類と一緒に保管しないこと。
※錆の原因となります。

【保守・点検に係る事項】

しばらく使用しなかった本品を再使用するときは、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
 電話番号 03-5808-9350
 製造業者 DAESEUNG MEDICAL Co.
 (ダエソン メディカル シーオー)
 製造国 大韓民国