

機械器具 39 医療用鉗子  
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ（33209000）  
コンバーチブルキャップ・リムーバー

**【形状、構造及び原理等】**

<形状、構造>



<材質>

- ・ステンレス鋼、ポリカーボネート樹脂

**【使用目的又は効果】**

歯列矯正用バンドに接着した歯列矯正用チューブを保持したり、外すために用いる。

**【使用方法等】**

- ・本品のチップ部を歯列矯正用チューブに合わせ、グリップを握りますと、チューブが保持されます。その状態で、チューブを取り外します。
- ・チップ部は、消耗により、交換します。

**【使用上の注意】**

- 1) 使用注意
  - ①無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 2) 重要な基本的注意
  - ①本品の使用にあたっては、外観上の損害、各部位の緩み等がないか、確認を行うこと。
  - ②正常かつ安全に作動すること等を確認するため、保守点検を行うこと。
  - ③使用にあたっては、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

【保管方法】

- 1) 本品は40℃未満（但し、結露しない）で保管する。
- 2) 本品は使用前に、塩酸、硝酸等の鉱酸類と一緒に保管しないこと。

**【保守・点検に係る事項】**

しばらく使用しなかった本品を再使用するときは、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。

**【包装】**

- |          |  |    |
|----------|--|----|
| P1090-00 | コンバーチブルキャップ・リムーバー                        | 1個 |
| P1090-01 | コンバーチブルキャップ・リムーバー<br>リプレースメントチップ（交換用チップ） | 2個 |

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

- |        |                            |
|--------|----------------------------|
| 製造販売業者 | 株式会社モリムラ                   |
| 電話番号   | 03-5808-9350               |
| 製造業者   | LEONE S.p.A（レオーネ エス・ピ・エー社） |
| 製造国    | イタリア                       |