

2016年7月5日改訂（第3版 新記載要領に基づく改訂）

2015年10月7日改訂（第2版）

2013年5月15日作成（第1版）

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000

届出番号:13B1X10089000815

マイクロルーペ レンズレスⅡ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

フレーム：ニッケル合金

ルーペレンズ：光学レンズ

レンズ側面：ABS プラスチック

〔形状・構造等〕

2種類：2.5倍、4倍

作業距離：2.5倍—約420mm、4倍—約500mm

視野範囲：2.5倍—約70mm、4倍—約30mm

焦点深度：2.5倍—約±80mm、4倍—約±50mm

重さ：2.5倍—47g、4倍—47g

外観写真 2.5倍



4倍



（付属品）

ケース、清掃用布、ドライバー、フレーム固定バンド



〔原理〕

装着されているレンズから覗く事により、作業視野の拡大像が得られる。

【使用目的又は効果】

作業野の拡大像を得る為に使用する。

【使用方法等】

1) 本品を装着する前に、レンズ・フレームをきれいに拭く。

2) 本体上部の中心にある調節ノブを回し、瞳孔間距離を調節する。



3) 高さ調整：フレームとルーペの接続部左右にあるノブを両側から指で押すと上下に動かすことができる。



【使用上の注意】

1. 歯科医療有資格者以外は使用しない事。
2. 装着中、光を直接見ないこと。失明する危険性がある。
3. 機器の寿命を著しく低下させるので粗雑な扱いはしない事。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

本体、レンズは滅菌不可。

水洗い不可。ルーペ内部に水分、水蒸気が入り曇りの原因となる。

清掃は、乾いた布で拭くこと。水分やアルコールを多く含んだ布を用いることも避ける。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel：03-5827-1380、FAX：03-5827-1381

製造業者：

NORTH (NANJING) INSTRUMENT TECHNOLOGY INDUSTRIES GROUP
(China)