

医療用品04 整形用品
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料(70914000)

スプリント a

【禁忌・禁止】

- (1) 本品は、患者の使用期間が30日以内となっているため、30日を超えて使用させないこと。
- (2) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

- 1) 材質：ポリエチレンテレフタレート
- 2) 形状：四角形、丸形
- 3) 寸法：以下のとおり

①四角形

サイズ	寸法	
	一辺 (mm)	厚さ (mm)
0.5mm	127±2.0	0.45~0.57
0.8mm		0.70~0.90
1.0mm		0.85~1.15
1.5mm		1.35~1.65
2.0mm		1.80~2.20

②丸形

サイズ	寸法	
	直径 (mm)	厚さ (mm)
0.5mm	120±2.0	0.45~0.57
0.8mm		0.70~0.90
1.0mm		0.85~1.15
1.5mm		1.35~1.65
2.0mm		1.80~2.20

【使用目的又は効果】

本品は歯科用咬合スプリントを作製する材料である。

【使用方法等】

- ①患者の印象模型を歯科技工用成型器(バキュームアダプター I 型)に設置し、本品を上部ホルダーにセットする。
- ②加熱部のスイッチを入れ、本品の入ったホルダーを加熱部まで引き上げる。
- ③本品が軟化し、垂れ下がってきたらホルダーを下げ、石膏模型に密着させる。
- ④吸引スイッチを入れる。
- ⑤フリーズスプレーを噴射し、本品を硬化させる。
- ⑥硬化したのち、模型から本品を取り外し、辺縁部、バリ等を研磨する。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ①本材は、傷、汚れを防ぐため、両面に保護シートがついているので使用(真空成型器へセットする)前に剥がしてから使用すること。
- ②真空成型器の加熱部は及び成形時の本品は、高温になるため、誤って触れないよう注意すること。
- ③厚いサイズを使用する際は、十分に加熱してから成型すること。
- ④本材は、患者の使用期間が30日を超えて使用しないこと。
- ⑤エッジ部分で手指等切らないように取扱には十分注意すること。
- ⑥本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。

2) 重要な基本的注意

- ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ②本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。

- ③本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・開封前は冷暗所に保管すること。開封後は、直射日光を避け、室温で保管すること。
- ・本材を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ・高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- ・使用後は、アルミパックに戻し、密封して保管すること。吸湿により成型時に気泡が発生することがあります。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp