

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 短期的使用歯科矯正用粘膜保護材 (70735000)

ペイシエントワックス

【形状・構造及び原理等】

成分：ワックス、その他
種類：プレーン、ミント
形状：外観写真のとおり



【使用目的又は効果】

歯科矯正装置による口腔内粘膜への刺激を緩和するために装置を被覆する材料で、短期に使用する。

【使用方法等】

本品を歯科矯正装置に被覆して使用する。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ① 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある患者には使用しないこと。
- ② 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
- ③ 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ④ 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ⑤ 本材の使用に際して、歯科医師は患者に本材を飲みこまない等適切な指導をすること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・ 本材の保管時、輸送時には、直射日光を避けること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[使用期限等]

構成品の包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリムラ
電話番号：03-5808-9350
製造業者：G&H Wire Company, Inc.
製造先国名：アメリカ合衆国