

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用帯環 (38734000)
キャリブラ バンド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- * 1. 本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- * 2. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

<材質>

J I S G 4303 (ステンレス鋼棒) の SUS 304

<形状>

帯状で、前歯、犬歯、小臼歯、大臼歯に適合するコントアを有している。

<寸法>

バンド環の円周の長さで分類される。

<種類>

- ① ウェブ上顎第一大臼歯バンド (32 種類)
右側: E8200-XX (01~32)
左側: E8300-XX (01~32)
- ② ウェブ下顎第一大臼歯バンド (32 種類)
右側: E8600-XX (01~32)
左側: E8700-XX (01~32)

【使用目的又は効果】

本器を歯面にはめ込み、本器にろう着したブラケットにより、歯列矯正を行う。

【使用方法等】

- 1) 装着する歯牙の種類、サイズに適合するバンドを選択する。
- 2) 装着する歯牙の歯面の清掃及びエッチングを行う。
- 3) 装着するバンドに、セメントを塗布し装着する。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
 - ② 本品は再使用しないこと。
 - ③ 変形や変質している製品は、使用せずに弊社までご連絡ください。
 - ④ 装置を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理してください。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ② 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

*[保管方法]

- 1) 本品は、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 2) 本品は化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【包装】

<キット>

- **E8200-92 ウェブ上顎第1大臼歯バンドキット 右側 78入
- **E8300-92 ウェブ上顎第1大臼歯バンドキット 左側 78入

- **E8600-92 ウェブ下顎第1大臼歯バンドキット 右側 78入
- **E8700-92 ウェブ下顎第1大臼歯バンドキット 左側 78入

<単品>

- **E8200-01 ウェブ アナトミカル UR #1 10入
- **E8200-02 ウェブ アナトミカル UR #2 10入
- **E8200-03 ウェブ アナトミカル UR #3 10入
- **E8200-04 ウェブ アナトミカル UR #4 10入
- **E8200-05 ウェブ アナトミカル UR #5 10入
- **E8200-06 ウェブ アナトミカル UR #6 10入
- **E8200-07 ウェブ アナトミカル UR #7 10入
- **E8200-08 ウェブ アナトミカル UR #8 10入
- **E8200-09 ウェブ アナトミカル UR #9 10入
- **E8200-10 ウェブ アナトミカル UR #10 10入
- **E8200-11 ウェブ アナトミカル UR #11 10入
- **E8200-12 ウェブ アナトミカル UR #12 10入
- **E8200-13 ウェブ アナトミカル UR #13 10入
- **E8200-14 ウェブ アナトミカル UR #14 10入
- **E8200-15 ウェブ アナトミカル UR #15 10入
- **E8200-16 ウェブ アナトミカル UR #16 10入
- **E8200-17 ウェブ アナトミカル UR #17 10入
- **E8200-18 ウェブ アナトミカル UR #18 10入
- **E8200-19 ウェブ アナトミカル UR #19 10入
- **E8200-20 ウェブ アナトミカル UR #20 10入
- **E8200-21 ウェブ アナトミカル UR #21 10入
- **E8200-22 ウェブ アナトミカル UR #22 10入
- **E8200-23 ウェブ アナトミカル UR #23 10入
- **E8200-24 ウェブ アナトミカル UR #24 10入
- **E8200-25 ウェブ アナトミカル UR #25 10入
- **E8200-26 ウェブ アナトミカル UR #26 10入
- **E8200-27 ウェブ アナトミカル UR #27 10入
- **E8200-28 ウェブ アナトミカル UR #28 10入
- **E8200-29 ウェブ アナトミカル UR #29 10入
- **E8200-30 ウェブ アナトミカル UR #30 10入
- **E8200-31 ウェブ アナトミカル UR #31 10入
- **E8200-32 ウェブ アナトミカル UR #32 10入
- **E8300-01 ウェブ アナトミカル UL #1 10入
- **E8300-02 ウェブ アナトミカル UL #2 10入
- **E8300-03 ウェブ アナトミカル UL #3 10入
- **E8300-04 ウェブ アナトミカル UL #4 10入
- **E8300-05 ウェブ アナトミカル UL #5 10入
- **E8300-06 ウェブ アナトミカル UL #6 10入
- **E8300-07 ウェブ アナトミカル UL #7 10入
- **E8300-08 ウェブ アナトミカル UL #8 10入
- **E8300-09 ウェブ アナトミカル UL #9 10入
- **E8300-10 ウェブ アナトミカル UL #10 10入
- **E8300-11 ウェブ アナトミカル UL #11 10入
- **E8300-12 ウェブ アナトミカル UL #12 10入
- **E8300-13 ウェブ アナトミカル UL #13 10入
- **E8300-14 ウェブ アナトミカル UL #14 10入
- **E8300-15 ウェブ アナトミカル UL #15 10入
- **E8300-16 ウェブ アナトミカル UL #16 10入
- **E8300-17 ウェブ アナトミカル UL #17 10入
- **E8300-18 ウェブ アナトミカル UL #18 10入
- **E8300-19 ウェブ アナトミカル UL #19 10入
- **E8300-20 ウェブ アナトミカル UL #20 10入
- **E8300-21 ウェブ アナトミカル UL #21 10入
- **E8300-22 ウェブ アナトミカル UL #22 10入
- **E8300-23 ウェブ アナトミカル UL #23 10入

**E8300-24	ウェア	アナミカル	UL #24	10	入
**E8300-25	ウェア	アナミカル	UL #25	10	入
**E8300-26	ウェア	アナミカル	UL #26	10	入
**E8300-27	ウェア	アナミカル	UL #27	10	入
**E8300-28	ウェア	アナミカル	UL #28	10	入
**E8300-29	ウェア	アナミカル	UL #29	10	入
**E8300-30	ウェア	アナミカル	UL #30	10	入
**E8300-31	ウェア	アナミカル	UL #31	10	入
**E8300-32	ウェア	アナミカル	UL #32	10	入
**E8600-01	ウェア	アナミカル	LR #1	10	入
**E8600-02	ウェア	アナミカル	LR #2	10	入
**E8600-03	ウェア	アナミカル	LR #3	10	入
**E8600-04	ウェア	アナミカル	LR #4	10	入
**E8600-05	ウェア	アナミカル	LR #5	10	入
**E8600-06	ウェア	アナミカル	LR #6	10	入
**E8600-07	ウェア	アナミカル	LR #7	10	入
**E8600-08	ウェア	アナミカル	LR #8	10	入
**E8600-09	ウェア	アナミカル	LR #9	10	入
**E8600-10	ウェア	アナミカル	LR #10	10	入
**E8600-11	ウェア	アナミカル	LR #11	10	入
**E8600-12	ウェア	アナミカル	LR #12	10	入
**E8600-13	ウェア	アナミカル	LR #13	10	入
**E8600-14	ウェア	アナミカル	LR #14	10	入
**E8600-15	ウェア	アナミカル	LR #15	10	入
**E8600-16	ウェア	アナミカル	LR #16	10	入
**E8600-17	ウェア	アナミカル	LR #17	10	入
**E8600-18	ウェア	アナミカル	LR #18	10	入
**E8600-19	ウェア	アナミカル	LR #19	10	入
**E8600-20	ウェア	アナミカル	LR #20	10	入
**E8600-21	ウェア	アナミカル	LR #21	10	入
**E8600-22	ウェア	アナミカル	LR #22	10	入
**E8600-23	ウェア	アナミカル	LR #23	10	入
**E8600-24	ウェア	アナミカル	LR #24	10	入
**E8600-25	ウェア	アナミカル	LR #25	10	入
**E8600-26	ウェア	アナミカル	LR #26	10	入
**E8600-27	ウェア	アナミカル	LR #27	10	入
**E8600-28	ウェア	アナミカル	LR #28	10	入
**E8600-29	ウェア	アナミカル	LR #29	10	入
**E8600-30	ウェア	アナミカル	LR #30	10	入
**E8600-31	ウェア	アナミカル	LR #31	10	入
**E8600-32	ウェア	アナミカル	LR #32	10	入
**E8700-01	ウェア	アナミカル	LL #1	10	入
**E8700-02	ウェア	アナミカル	LL #2	10	入
**E8700-03	ウェア	アナミカル	LL #3	10	入
**E8700-04	ウェア	アナミカル	LL #4	10	入
**E8700-05	ウェア	アナミカル	LL #5	10	入
**E8700-06	ウェア	アナミカル	LL #6	10	入
**E8700-07	ウェア	アナミカル	LL #7	10	入
**E8700-08	ウェア	アナミカル	LL #8	10	入
**E8700-09	ウェア	アナミカル	LL #9	10	入
**E8700-10	ウェア	アナミカル	LL #10	10	入
**E8700-11	ウェア	アナミカル	LL #11	10	入
**E8700-12	ウェア	アナミカル	LL #12	10	入
**E8700-13	ウェア	アナミカル	LL #13	10	入
**E8700-14	ウェア	アナミカル	LL #14	10	入
**E8700-15	ウェア	アナミカル	LL #15	10	入
**E8700-16	ウェア	アナミカル	LL #16	10	入
**E8700-17	ウェア	アナミカル	LL #17	10	入
**E8700-18	ウェア	アナミカル	LL #18	10	入
**E8700-19	ウェア	アナミカル	LL #19	10	入
**E8700-20	ウェア	アナミカル	LL #20	10	入
**E8700-21	ウェア	アナミカル	LL #21	10	入
**E8700-22	ウェア	アナミカル	LL #22	10	入
**E8700-23	ウェア	アナミカル	LL #23	10	入
**E8700-24	ウェア	アナミカル	LL #24	10	入
**E8700-25	ウェア	アナミカル	LL #25	10	入
**E8700-26	ウェア	アナミカル	LL #26	10	入
**E8700-27	ウェア	アナミカル	LL #27	10	入
**E8700-28	ウェア	アナミカル	LL #28	10	入
**E8700-29	ウェア	アナミカル	LL #29	10	入

**E8700-30	ウェア	アナミカル	LL #30	10	入
**E8700-31	ウェア	アナミカル	LL #31	10	入
**E8700-32	ウェア	アナミカル	LL #32	10	入

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 **株式会社モリムラ
 電話番号 **03-5808-9350
 製造業者 LEONE S.p.A (レオネ エス・ピ・オー・エー社)
 *製造国 イタリア