

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用ワイヤ(16204000)
アーチワイヤー

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- この製品はニッケルを含有しています。ニッケル又は本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
- 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、JIS T 6530「歯列矯正用ワイヤ(種類:タイプ 2)」に該当します。

1.形状

トゥルーフォーム

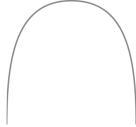

2.種類

ワイヤーには、レギュラータイプ、コーティングタイプの2種類、断面の形状と寸法があり、上顎用と下顎用の2種類がある。

断面形状	寸法(mm)	寸法(インチ)
ラウンド	0.304	0.012
	0.355	0.014
	0.406	0.016
	0.457	0.018
スクエア	0.406×0.406	0.016×0.016
レクタンギュラー	0.406×0.559	0.016×0.022
	0.432×0.635	0.017×0.025
	0.457×0.635	0.018×0.025
	0.483×0.635	0.019×0.025

3.原材料

ニッケルチタン合金(Ni 55~57%, Ti 43~45%, その他 0.25%以下)、樹脂

4.原理

ニッケルチタン合金の弾力により、歯牙の移動を行う。

【使用目的又は効果】

弧状で歯の移動又は維持のために歯に力を加えること。

【使用方法等】

あらかじめ歯面に接着したブラケットのスロットに本品を適用させ、エラストックゴムまたは結紮線等で固定し、歯列矯正を行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 強く結紮をするとワイヤーが破切することがあるので、注意すること。
- ブラケットあるいはチューブに装着する際にはワイヤーの表面に傷を付けないために、ワイヤーに接する面が平らなインスツルメントを使用し、先端にギザギザが付いたインスツルメントを使用しないこと。

【使用上の注意】

【使用注意】

- 本品は再使用しないこと。
- コーティングタイプは、薄膜のため外的損傷により、コーティングが剥離する場合がありますので、注意すること。

【重要な基本的注意】

- ニッケル又は本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
- 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【不具合・有害事象】

有害事象
掌蹼膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

*[保管方法]

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

[単品包装]

- (1) レギュラータイプ 各 10 本入
- 73-012 上顎用ラウンド 0.012
 - 73-014 上顎用ラウンド 0.014
 - 73-016 上顎用ラウンド 0.016
 - 73-018 上顎用ラウンド 0.018
 - 73-1616 上顎用スクエア 0.016×0.016
 - 73-1622 上顎用レクタンギュラー 0.016×0.022
 - 73-1725 上顎用レクタンギュラー 0.017×0.025
 - 73-1825 上顎用レクタンギュラー 0.018×0.025
 - 73-1925 上顎用レクタンギュラー 0.019×0.025
 - 74-012 下顎用ラウンド 0.012
 - 74-014 下顎用ラウンド 0.014
 - 74-016 下顎用ラウンド 0.016
 - 74-018 下顎用ラウンド 0.018
 - 74-1616 下顎用スクエア 0.016×0.016
 - 74-1622 下顎用レクタンギュラー 0.016×0.022
 - 74-1725 下顎用レクタンギュラー 0.017×0.025
 - 74-1825 下顎用レクタンギュラー 0.018×0.025
 - 74-1925 下顎用レクタンギュラー 0.019×0.025

(2) コーティングタイプ 各 10 本入

- 73-012W 上顎用ラウンド 0.012
- 73-014W 上顎用ラウンド 0.014
- 73-016W 上顎用ラウンド 0.016
- 73-018W 上顎用ラウンド 0.018
- 73-1616W 上顎用スクエア 0.016×0.016
- 73-1622W 上顎用レクタンギュラー 0.016×0.022
- 73-1725W 上顎用レクタンギュラー 0.017×0.025
- 73-1825W 上顎用レクタンギュラー 0.018×0.025
- 73-1925W 上顎用レクタンギュラー 0.019×0.025
- 74-012W 下顎用ラウンド 0.012
- 74-014W 下顎用ラウンド 0.014
- 74-016W 下顎用ラウンド 0.016
- 74-018W 下顎用ラウンド 0.018
- 74-1616W 下顎用スクエア 0.016×0.016
- 74-1622W 下顎用レクタンギュラー 0.016×0.022
- 74-1725W 下顎用レクタンギュラー 0.017×0.025
- 74-1825W 下顎用レクタンギュラー 0.018×0.025
- 74-1925W 下顎用レクタンギュラー 0.019×0.025

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 **株式会社モリムラ
電話番号 **03-5808-9350
製造業者 ダエソン メディカル シーオー
(DAESEUNG MEDICAL Co.)
製造国 大韓民国