

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用ワイヤ (16204000)
レオーネ ステンレス ワイヤー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- * 1. 本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- * 2. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

<材質>


- ・クロム系ステンレススチール合金

<形状>

- ・ワイヤー断面の形状は、丸型及び角型の2種類がある。

丸型 (ラウンド)


角型 (スクエア・レクタングュラー)

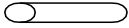

- ・ワイヤー形状は、ストレート及びプリフォームアーチワイヤーの2種類がある。

ストレートワイヤー

アーチワイヤー
上類用

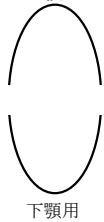

下類用

<品番>

レオーネ スプール タイプ ラウンド

直径	長さ表示タイプ		重量表示タイプ(500g)	
	全長	品番	重量	品番
0.50	50.0M	C0400-05	500g	C0450-05
0.60	40.0M	C0400-06	500g	C0450-06
0.70	25.0M	C0400-07	500g	C0450-07
0.80	20.0M	C0400-08	500g	C0450-08
0.90	10.0M	C0400-09	500g	C0450-09
1.00	10.0M	C0400-10	500g	C0450-10
1.10	10.0M	C0400-11	500g	C0450-11
1.20	10.0M	C0400-12	500g	C0450-12
1.30	10.0M	C0400-13	500g	C0450-13
1.40	10.0M	C0400-14	500g	C0450-14

レオーネ ストレート タイプ ラウンド

直径		硬さ		
インチ	(mm)	ハード	スプリング ハード	エキストラ ハード
.014	(0.35)	C8080-14	C8180-14	C8380-14
.016	(0.40)	C8080-16	C8180-16	C8380-16
.018	(0.45)	C8080-18	C8180-18	C8380-18
.020	(0.50)	C8080-20	C8180-20	C8380-20
.032	(0.81)	C8080-32		
.036	(0.91)	C8080-36		
.040	(1.01)	C8080-40		
.045	(1.14)	C8080-45		
.051	(1.29)	C8080-51		

・全長:355.6mm

レオーネ ストレート タイプ スクエア・レクタングュラー

全長:355.6mm

縦 × 横		硬さ	
インチ	(mm)	スプリング ハード	エキストラ ハード
.016×.016	(0.40×0.40)		C8116-16
.017×.017	(0.43×0.43)		C8117-17
.016×.022	(0.40×0.55)	C8022-16	C8122-16
.017×.022	(0.43×0.55)	C8022-17	C8122-17
.017×.025	(0.43×0.63)	C8025-17	
.018×.022	(0.45×0.55)	C8022-18	C8125-17
.018×.025	(0.45×0.63)	C8025-18	C8125-18
.019×.025	(0.48×0.63)	C8025-19	C8125-19
.021×.025	(0.53×0.63)		C8125-21
.021×.028	(0.54×0.71)	C8028-21	C8128-21

オーソリアン ワイヤー スプール タイプ ラウンド

直径		硬さ	
インチ	(mm)	エキストラ スプリング ハード	スーパー ハード ヒート トリート
.012	0.30	C0420-12	
.014	0.35	C0420-14	C0430-14
.016	0.40	C0420-16	C0430-16
.018	0.45	C0420-18	C0430-18
.020	0.50	C0420-20	C0430-20

全長:8M

ツイスト ワイヤー ストレート タイプ ラウンド

直径		
インチ	(mm)	品番
.015	(0.38)	C8580-15
.017	(0.44)	C8580-17
.019	(0.49)	C8580-19
.021	(0.54)	C8580-21



全長:355.6mm

フレックス ワイヤー ストレート タイプ ラウンド

直径		
インチ	(mm)	品番
.015	(0.38)	C8880-15
.017	(0.44)	C8880-17
.019	(0.49)	C8880-19



全長:355.6mm

プリフォーム フレックス アーチワイヤー ラウンド

直径		
インチ	(mm)	品番
.015	(0.38)	C5440-15
.017	(0.44)	C5440-17



全長 168 × 端間距離 58mm

スリー ストレンド ツイスト アーチワイヤー スクエア・レクタングュラー

縦 × 横		品番
インチ	(mm)	
.016×.016	(0.40×0.40)	C5541-16



全長 168 × 端間距離 58mm

エイト ストレンド ツイスト アーチワイヤー スクエア・レクタングュラー

縦 × 横		品番
インチ	(mm)	
.017×.025	(0.43×0.63)	C5745-17
.018×.025	(0.45×0.63)	C5745-18



全長 168 × 端間距離 58mm

プリフォーム スタンダード アーチワイヤー ラウンド

○ 直径			
インチ	(mm)	上顎用	下顎用
.012	0.30	C5110-12	C5150-12
.014	0.35	C5110-14	C5150-14
.016	0.40	C5110-16	C5150-16
.018	0.45	C5110-18	C5150-18
.020	0.50	C5110-20	C5150-20
		全長 168 × 距離 58mm 正中線に黒マーク付。	全長 164 × 距離 54mm、 正中線に赤マーク付。

プリフォーム スタンダード アーチワイヤー スクエア・レクタングル

□ 縦 × 横			
インチ	(mm)	上顎用	下顎用
.016 × .016	(0.40 × 0.40)	C5111-16	C5151-16
.016 × .022	(0.40 × 0.55)	C5112-16	C5152-16
.017 × .025	(0.43 × 0.63)	C5115-17	C5155-17
.018 × .025	(0.45 × 0.63)	C5115-18	C5155-18
.019 × .025	(0.48 × 0.63)	C5115-19	C5155-19
.021 × .025	(0.53 × 0.63)	C5115-21	C5155-21
		全長 170 × 距離 72mm 正中線に黒マ ーク付。	全長 166 × 距離 68mm、 正中線に赤マ ーク付。

プリフォーム ナチュラル アーチワイヤー ラウンド

上顎用 ○ 直径

インチ	(mm)	スモール	ミディアム	ラージ
.014	(0.35)	C3010-16	C3110-14	
.016	(0.40)		C3110-16	C3210-16
.018	(0.45)		C3110-18	C3210-18
.020	(0.50)		C3110-20	
			全長 164 mm 距離 68 mm	全長 168 mm 距離 72 mm

下顎用 ○ 直径

インチ	(mm)	スモール	ミディアム	ラージ	
.014	(0.35)	C3050-16	C3150-14		
.016	(0.40)		C3150-16	C3250-16	
.018	(0.45)		C3050-18	C3150-18	C3250-18
.020	(0.50)			C3150-20	
			全長 160 mm 距離 64 mm	全長 164 mm 距離 68 mm	全長 168 mm 距離 72 mm

プリフォーム ナチュラル アーチワイヤー スクエア・レクタングル

上顎用 □ 縦 × 横

インチ	(mm)	スモール	ミディアム	ラージ	
.016 × .016	(0.40 × 0.40)	C3012-16	C3111-16		
.016 × .022	(0.40 × 0.55)		C3112-16	C3212-16	
.017 × .025	(0.43 × 0.63)			C3112-17	
.018 × .025	(0.45 × 0.63)		C3012-18	C3112-18	C3212-18
.019 × .025	(0.48 × 0.63)		C3012-19	C3112-19	C3212-19
.021 × .025	(0.53 × 0.63)		C3112-21		
		全長 164 mm 距離 68 mm	全長 168 mm 距離 72 mm	全長 172 mm 距離 76 mm	

下顎用 □ 縦 × 横

インチ	(mm)	スモール	ミディアム	ラージ	
.016 × .016	(0.40 × 0.40)	C3052-16	C3151-16		
.016 × .022	(0.40 × 0.55)		C3152-16	C3252-16	
.017 × .025	(0.43 × 0.63)			C3152-17	
.018 × .025	(0.45 × 0.63)		C3052-18	C3152-18	C3252-18
.019 × .025	(0.48 × 0.63)		C3052-19	C3152-19	C3250-19
.021 × .025	(0.53 × 0.63)		C3152-21		
		全長 160 mm 距離 64 mm	全長 164 mm 距離 68 mm	全長 168 mm 距離 72 mm	

プリフォーム パラタルバー ラウンド

距離	品番
34	C0570-34
36	C0570-36
38	C0570-38
40	C0570-40
42	C0570-42
44	C0570-44
46	C0570-46
48	C0570-48
50	C0570-50
52	C0570-52
34-52 アソートキット	C0570-96

○ 直径:0.9mm

プリフォーム リバース ループ パラタルバー ラウンド

距離	品番
34	C0576-34
36	C0576-36
38	C0576-38
40	C0576-40
42	C0576-42
44	C0576-44
46	C0576-46
48	C0576-48
50	C0576-50
52	C0576-52
34-52 アソートキット	C0576-96

○ 直径:0.9mm

プリフォーム アダムス クラスプ

距離	品番
5.0	C0580-05
5.5	C0580-055
6.0	C0580-06
6.5	C0580-065
7.0	C0580-07
8.0	C0580-08
9.0	C0580-09
10.0	C0580-10
11.0	C0580-11
12.0	C0580-12
5.0-12.0 アソートキット	C0580-95

○ 直径:0.7mm

プリフォーム レビアル アーチワイヤー

ループ間距離(mm)	品番
25	C0585-25
28	C0585-28
31	C0585-31
34	C0585-34
37	C0585-37
40	C0585-40
43	C0585-43
46	C0585-46
48	C0585-48
50	C0585-50
25-50 アソートキット	C0585-95

○ 直径:0.8mm

ボール クラスプ

インチ	(mm)	品番
17	(0.7)	C1610-17
18	(0.8)	C1610-18
19	(0.9)	C1610-19

距離(全長) 40mm

<付属品>

クリンパブル クローズドフック G9019-25

	.018	.022
サージカル フック2.0mm	G9620-18	G9620-22
2.0mm(オープン)	G9650-18	G9650-22

【使用目的又は効果】

本品を、歯面に接着したブラケットのスロットに装着し、結紮して歯列の矯正を行う。

【使用方法等】

<ブラケット等への使用>

- 1) 石膏模型に基づき本品にマーキングペンシルでしるしをつけます。
- 2) ワイヤークッターで本品を切断します。
- 3) プライヤーを用い必要なベンディングを施します。
- 4) ブラケットのスロットやチューブ等に通し、通法により固定します。

【使用方法に関する使用上の注意】

- 1) ワイヤー径に適したカッターを用いて下さい。
合わない場合カッターに破損を生じることがあります。
- 2) 同じ箇所にも何度もベンディングを施した場合、ワイヤーが切断することがあります。その際、熱を発生することがありますのでご注意ください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
 - ② 本品は再使用しないこと。
 - ③ 変形や変質している製品は、使用せずに弊社までご連絡ください。
 - ④ 装置を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理してください。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ② 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

***【保管方法】**

- 1) 本品は40℃未満（但し、結露しない）で保管する。
- 2) 本品は使用前に、塩酸、硝酸等の鉱酸類と一緒に保管しないでください。

【包装】

C0400-05	レオネ Leowire 020 (0.5mm)	ラウンドスプリングハードスプール 50m
C0400-06	レオネ Leowire 024 (0.6mm)	ラウンドスプリングハードスプール 40m
C0400-07	レオネ Leowire 028 (0.7mm)	ラウンドスプリングハードスプール 25m
C0400-08	レオネ Leowire 032 (0.8mm)	ラウンドスプリングハードスプール 20m
C0400-09	レオネ Leowire 036 (0.9mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0400-10	レオネ Leowire 040 (1.0mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0400-11	レオネ Leowire 044 (1.1mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0400-12	レオネ Leowire 048 (1.2mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0400-13	レオネ Leowire 052 (1.3mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0400-14	レオネ Leowire 055 (1.4mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0420-12	レオネ 012 オーストラリアワイヤー エキストラ スプリング スプール 8m	
C0420-14	レオネ 014 オーストラリアワイヤー エキストラ スプリング スプール 8m	
C0420-16	レオネ 016 オーストラリアワイヤー エキストラ スプリング スプール 8m	
C0420-18	レオネ 018 オーストラリアワイヤー エキストラ スプリング スプール 8m	
C0420-20	レオネ 020 オーストラリアワイヤー エキストラ スプリング スプール 8m	
C0430-14	レオネ 014 オーストラリアワイヤー スーパー スプリング スプール 8m	
C0430-16	レオネ 016 オーストラリアワイヤー スーパー スプリング スプール 8m	
C0430-18	レオネ 018 オーストラリアワイヤー スーパー スプリング スプール 8m	
C0430-20	レオネ 020 オーストラリアワイヤー スーパー スプリング スプール 8m	
C0450-05	レオネ 020 オーストラリアワイヤー スーパー スプリング スプール 500g	
C0450-06	レオネ Leowire 024 (0.6mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-07	レオネ Leowire 028 (0.7mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-08	レオネ Leowire 032 (0.8mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-09	レオネ Leowire 036 (0.9mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-10	レオネ Leowire 040 (1.0mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-11	レオネ Leowire 044 (1.1mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-12	レオネ Leowire 048 (1.2mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-13	レオネ Leowire 052 (1.3mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-14	レオネ Leowire 055 (1.4mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0570-34	レオネ 036 プリフォームパラレルバー	34mm 5入

C0570-36	レオネ 036 プリフォームパラレルバー	36mm 5入
C0570-38	レオネ 036 プリフォームパラレルバー	38mm 5入
C0570-40	レオネ 036 プリフォームパラレルバー	40mm 5入
C0570-42	レオネ 036 プリフォームパラレルバー	42mm 5入
C0570-44	レオネ 036 プリフォームパラレルバー	44mm 5入
C0570-46	レオネ 036 プリフォームパラレルバー	46mm 5入
C0570-48	レオネ 036 プリフォームパラレルバー	48mm 5入
C0570-50	レオネ 036 プリフォームパラレルバー	50mm 5入
C0570-52	レオネ 036 プリフォームパラレルバー	52mm 5入
C0570-96	レオネ 036 プリフォームパラレルバーキット	34-52mm 50入
C0576-34	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバー	34mm 5入
C0576-36	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバー	36mm 5入
C0576-38	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバー	38mm 5入
C0576-40	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバー	40mm 5入
C0576-42	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバー	42mm 5入
C0576-44	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバー	44mm 5入
C0576-46	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバー	46mm 5入
C0576-48	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバー	48mm 5入
C0576-50	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバー	50mm 5入
C0576-52	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバー	52mm 5入
C0576-96	レオネ 036 プリフォームリバースループパラレルバーキット	34-52mm 50入
C0580-05	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド	5.0mm 10入
C0580-055	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド	5.5mm 10入
C0580-06	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド	6.0mm 10入
C0580-065	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド	6.5mm 10入
C0580-07	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド	7.0mm 10入
C0580-08	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド	8.0mm 10入
C0580-09	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド	9.0mm 10入
C0580-10	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド	10.0mm 10入
C0580-11	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド	11.0mm 10入
C0580-12	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド	12.0mm 10入
C0580-95	レオネ 0.7mm アダムス クラスプ ラウンド キット	5.0mm-12.0mm 100入
C0585-25	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチ	25mm 10入
C0585-28	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチ	28mm 10入
C0585-31	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチ	31mm 10入
C0585-34	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチ	34mm 10入
C0585-37	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチ	37mm 10入
C0585-40	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチ	40mm 10入
C0585-43	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチ	43mm 10入
C0585-46	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチ	46mm 10入
C0585-48	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチ	48mm 10入
C0585-50	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチ	50mm 10入
C0585-95	レオネ 0.8mm プリフォームラビアルアチキット	25mm-50mm 100入
C1610-17	レオネ 028 (0.7mm) ボール クラスプ	100入
C1610-18	レオネ 032 (0.8mm) ボール クラスプ	100入
C1610-19	レオネ 036 (0.9mm) ボール クラスプ	100入
C3010-16	レオネ 016 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3012-16	レオネ 016×022 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3012-18	レオネ 018×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3012-19	レオネ 019×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3050-16	レオネ 016 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3050-18	レオネ 018 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3052-16	レオネ 016×022 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3052-18	レオネ 018×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3052-19	レオネ 019×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3110-14	レオネ 014 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3110-16	レオネ 016 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3110-18	レオネ 018 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3110-20	レオネ 020 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3111-16	レオネ 016×016 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3112-16	レオネ 016×022 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3112-17	レオネ 017×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3112-18	レオネ 018×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3112-19	レオネ 019×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3112-21	レオネ 021×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3150-14	レオネ 014 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3150-16	レオネ 016 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3150-18	レオネ 018 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3150-20	レオネ 020 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3151-16	レオネ 016×016 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3152-16	レオネ 016×022 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3152-17	レオネ 017×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3152-18	レオネ 018×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3152-19	レオネ 019×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3152-21	レオネ 021×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3210-16	レオネ 016 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3210-18	レオネ 018 プリフォーム チュール アチワイヤー ラウンド	10入
C3212-16	レオネ 016×022 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3212-18	レオネ 018×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入
C3212-19	レオネ 019×025 プリフォーム チュール アチワイヤー	レクタギョータ 10入

