

ステンスリガチャータイ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

- 本品の形状、構造は以下のとおり。

プリフォーム[®]リガチャーワイヤ[®] ロング

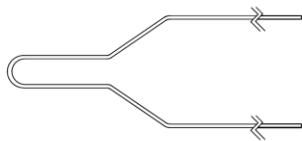

コバ[®]ヤシタイフック ロング

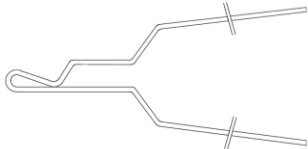

- 成分・分量 SUS304

成分	分量
鉄	69.5%
クロム	18.5%
ニッケル	9.0%
マンガン	1.0%
コバルト	0.75%
その他	炭素、ケイ素、リン、硫黄

- 仕様

項目	規格		
引張強さ	プリフォーム [®] リガチャーワイヤ [®] ロング	85~130psi	0.59~0.90MPa
	コバ [®] ヤシタイフック ロング	90~120psi	0.62~0.83MPa
伸び	30%以上		

【使用目的又は効果】

矯正用ワイヤをアタッチメントに連結、保持等をするために用いる。

【使用方法等】

患者口腔内で、歯牙に接着したブラケットに、ワイヤを差し込み、本品で結さつする。症例によっては矯正用エラスチック材を結さつ後の本品頭部に掛けて使用する。

【使用上の注意】

- 使用上の注意
 - 本品を使用して結さつした際には患者口腔内を傷つけないよう十分注意すること。
 - 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
 - 本品を使用して結さつする際に過度の加工を行わないこと。
- 重要な基本的注意
 - 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - 本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、手袋などを用い、直接本材に触れないようにすること。
 - 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

【使用期限】

本品は、包装に記載の使用期限までに使用すること。
【記載の使用期限は輸入元製造業者データによる。】

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリムラ
電話番号：03-5808-9350
製造業者：G&H Wire Company, Inc.
製造先国名：アメリカ合衆国