

## リガチャーワイヤー

再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

- ・ ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

### \*\*【形状・構造及び原理等】

細いワイヤを歯列矯正用アタッチメント等に引っ掛けやすいようにループ状に加工しており、3種類の形状がある。

・ 形状

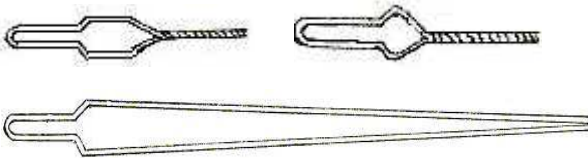

・ 原材料

ステンレス鋼（炭素 ケイ素 マンガン リン 硫黄 ニッケル クロム 鉄）

・ 原理

歯列矯正用アタッチメント等に、引っ掛けやすいようにループ状に加工あり、歯列矯正用結さつ器で結さつする。

### 【使用目的又は効果】

矯正用ワイヤをアタッチメントに連結、保持等をするために用いること。

### 【使用方法等】

- ① 歯列矯正用結さつ器に本品をセットする。
- ② 歯列矯正用アタッチメント等に引っ掛け、歯列矯正用結さつ器をねじって結さつする。

### 【使用上の注意】

・ 使用注意

- ① 本品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ② 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ③ 万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ④ 本品を廃棄する場合には、廃棄物処理に関する法令等に従い、適切に処理してください。

・ 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 使用する接着剤、接着方法の不具合などにより、装着中に本品が脱落する場合があります。その場合は直ちに医師の診断を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

・ 保管方法

- ① 開封前は特に指定しないが外圧がかからないよう保管する。
- ② 一度開封した製品は埃、水分等が付かないようにする。

・ 耐用期間

使用開始から5年間

[自己認証（当社データ）による]

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社カンノ

住所 : 千葉県流山市おおたかの森西3-3-8

連絡先 : 04-7150-8822

製造業者 : 株式会社カンノ

販売元 : 株式会社ミツバオーソサプライ

住所 : 東京都豊島区巣鴨2-16-4 2F

連絡先 : 03-3949-0066