

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用ワイヤ (16204000)
レオロイ ワイヤー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- *1. **ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。**
- *2. **再使用禁止。**

【形状・構造及び原理等】

<材質>

- ・本品は次の原材料で構成する。
コバルトクロム合金
- ・コバルト
- ・クロム
- ・ニッケル
- ・モリブデン

<種類>

- ・レオロイ ワイヤー スプール ラウンド
- ・レオロイ ワイヤー ストレート ブルー スクエア
- ・レオロイ ワイヤー ストレート ブルー レクタンギュラー
- ・レオロイ ワイヤー ストレート イエロー スクエア
- ・レオロイ ワイヤー ストレート イエロー レクタンギュラー

【使用目的又は効果】

本品を、歯面に接着したブラケットのスロットに装着し、結紮して歯列の矯正を行う。

【使用方法等】

(1) クラスプの作成

- 1) 石膏模型に基づき本品にマーキングペンシルでしるしを付けます。
- 2) ワイヤーカッターで本品を切ります。
- 3) 専用のプライヤーを用い必要なベンディングを施します。
- 4) 通法に基づき蟻着します。
- 5) 余剰部品をバー等にて整えます。

(2) ブラケット等への使用

- 1) 石膏模型に基づき本品にマーキングペンシルでしるしを付けます。
- 2) ワイヤーカッターで本品を切断します。
- 3) プライヤーを用い必要なベンディングを施します。
- 4) ブラケットのスロットやチューブ等に通し、通法により固定します。

[使用方法に関する使用上の注意]

- 1) ワイヤー径に適したカッターを用いて下さい。
合わない場合カッターに破損を生じることがあります。
- 2) 同じ箇所は何度もベンディングを施した場合、ワイヤーが切断することがあります。その際、熱を発生することがありますのでご注意ください。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
- ② 本品は再使用しないこと。
- ③ 変形や変質している製品は、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ④ 装置を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理してください。

2) 重要な基本的注意

- ① ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ② 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

*[保管方法]

- 1) 本品は40℃未満(但し、結露しない)で保管する。
- 2) 本品は使用前に、塩酸、硝酸等の鉍酸類と一緒に保管しないでください。

【包装】

- **C0410-06 スプール 024(0.6mm)ラウンド 30m 入
- **C0410-07 スプール 028(0.7mm)ラウンド 22m 入
- **C0410-08 スプール 032(0.8mm)ラウンド 17m 入
- **C0410-09 スプール 036(0.9mm)ラウンド 13m 入
- **C0410-10 スプール 040(1.0mm)ラウンド 11m 入
- **C0410-11 スプール 044(1.1mm)ラウンド 9m 入
- **C0410-12 スプール 048(1.2mm)ラウンド 8m 入
- **C0410-13 スプール 052(1.3mm)ラウンド 6m 入
- **C8216-16 016×016 ストレートブルー 10 入
- **C8222-16 016×022 ストレートブルー 10 入
- **C8225-17 017×025 ストレートブルー 10 入
- **C8416-16 016×016 ストレートイエロー 10 入
- **C8422-16 016×022 ストレートイエロー 10 入
- **C8425-17 017×025 ストレートイエロー 10 入

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 **株式会社モリムラ
電話番号 **03-5808-9350
製造業者 LEONE S.p.A (レオネ エス・ピー・エー社)
*製造国 イタリア